

* 압축펌프 사용방법 *

- ◎ 펌프의 물라인을 스케일러 본체 후면에 연결합니다.
- ◎ ①번을 잡은 후 뚜껑을 열어서 정수물 혹은 증류수를 절반이상 채웁니다. (셀라인은 사용하지 마십시오)
- ◎ 뚜껑을 닫은후 ②번의 손잡이를 잡고 위 아래로 펌핑을 합니다. (압력을 느낄때 까지 합니다)
- ◎ ③번 손잡이 윗 부분을 누른 후 ④번의 레버를 앞으로 밀면 물 분사가 고정이 됩니다.
- ◎ 펌프에 장시간 물을 보관하지 마십시오.

