

- 제품 설치 방법 -

1. 제품에 동봉된 물호스를 이용하여 그림과 같이 수액세트에 연결합니다. (수액세트는 제품에 포함되어 있지 않습니다.)



[그림 1]

그림 1과 같이 점적통의 중간부분을 가위등을 이용하여 잘라줍니다.



[그림 2]

그림 2처럼 제품에 동봉된 물호스를 이용하여 점적통의 안쪽끝부분에 단단히 고정한후 약액통 등에 연결합니다. (이때 셀라인은 사용하지 마시고 가급적 증류수나 수도물을 사용합니다.) *약병 종류에 따라 처음 제품에 연결시 물이 잘 안나오는 경우가 있습니다. 이때에는 미리 물호스의 끝부분까지 물을 나오게 한다음 제품에 연결하여 사용하시기 바랍니다.*

2. 1번과 같이 연결한후 반대쪽 물호스는 제품뒷면에 연결합니다. (그림참조)



- 제품 후면에 보시면 WATER INPUT 이 있습니다. 먼저 위 그림의 파란색 동그라미 부분(고정나사)를 시계반대방향으로 돌려서 분리합니다. 그림과 같이 고정나사의 안에 물호스를 넣은후 고정나사를 시계방향으로 돌려서 고정하시면 됩니다.

3. 물호스를 연결한후 스케일러의 강도와 물의 양을 조절하여 사용합니다. (ART-SP2는 제품전면에 표시되어 있습니다. 마이크로 모터의 불이 켜져있을 경우에는 스케일러가 작동을 안하오니 주의하시기 바랍니다.)

4. 제품구성품.

- ART-SP2 : 제품본체, 핸드피스, 전원선, 마이크로 모터, 퍼미스 크림, 스케일러 팁 2개, 버세트, 물호스, 1회용 프로피컵 스케일러 팁 렌치, 마이크로 모터 스탠드, 풋스위치

* 제품 사용시 주의사항 *

1. 셀라인은 사용하지 마십시오. (제품 내부튜브의 부식원인이 됩니다.)
2. 스케일링후 장시간 미사용시에는 스케일러 팁을 따로 보관해 주십시오.
3. 정품 스케일러 팁을 사용하십시오. (비품사용시 핸드피스의 고장원인이 됩니다.)
4. 마이크로 모터(폴리셔) 사용후 제품내부에 물이 흘러 들어가면 베어링 부식의 원인이 됩니다. 이때에는 제품에 버를 깨끗이 한후 5분이상 작동시키면 자연증발되오니 참고하시기 바랍니다.
5. 다른 주의사항은 아래의 그림을 참조하십시오.

1회용 프로피 컵은 파워를 20% 내외로 사용할 것을 권장합니다. 파워를 높이면 기어가 파손이 되오니 주의하시기 바랍니다.

버의 교환 방법

1. 핸드피스의 척손잡이를 "R"방향으로 돌려 척을 연 후, 버를 교환하십시오.
2. 새로운 버를 골렛척의 끝을 때까지 완전히 밀어 넣은 후, 척손잡이를 "S"방향으로 돌려 척을 잠그세요.

*** 스케일러 팁 교환방법 ***

1. 스케일러 팁과 렌치를(그림 1, 2) 결합합니다. (그림참조)
2. 결합후 핸드피스에 꽂은후 시계방향으로 팁을 고정합니다. 팁을 시계방향으로 끝까지 돌린후 약간의 힘을 주어 고정합니다. 이때 너무 힘을 세게주면 핸드피스의 나사부분이 부러질수 있으니 주의하십시오.
4. 스케일러 팁 해제시에는 시계 반대방향으로 풀러주십시오.

6. 제품 및 AS 문의사항 : 이안덴메드(BONART 한국총판) TEL : 778-8053

Www.iandenmed.co.kr